

KULLANIM KILAVUZU

PRINT-ON



Türkçe

Ürün:	Perma, Denture, Splint ve Glaze	Kontrendikasyon:	Malzemeyi, belirtilen dental form imalatı dışında herhangi bir başka amaçla kullanılmamalıdır. Bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa veya temasa alerjiniz varsa, malzemeyi kullanmayınız.
Ürün Tipi:	3D Yazı için Reçine	Olası Yan Etki:	İçeriğindeki materyale karşı alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyon yaratabilir.
Ürün Formu:	Yoğun akışkan	Uyumluluk:	Ürün metakrilat bazlı ışıkla sertleşen birinci sınıf reçinedir. Ürün 3D yazıcılarda (DLP; SLA; CLIP; LCD) kullanım için uygundur.
Endikasyon:	PrintOn katmanlı imalat için ışıkla sertleşen diş reçinesidir. 3D yazıcı ile Dental parçalar üretilmektedir. <u>Perma :</u> Geçici ve kalıcı Kron ve Köprü üretimi; Temporary 3D Resin, geçici ve kalıcı kuron ve köprü restorasyonları, inleyler, onleyler ve veneerlerin 3D baskısı için diş renginde bir reçinedir. Yedi birime kadar köprüler için belirtilen ve farklı diş renginde mevcut olan bu malzeme mükemmel marjinal adaptasyon, güç ve estetik sağlar. <u>Splint :</u> Plak üretimi; Oklüzal plak, gece plağı veya ortodontik plak olarak adlandırılan bu ürün ısıрма plakaları ve ağız koruyucuları olarak invazif olmayan, geri dönüşümlü bir tedavi aracıdır. <u>Denture :</u> Çıkarılabilir Protez bazların imalatı; Tek bir arkta tüm dişlerin yerini alan çıkarılabilir bir protez tabanı. <u>Glaze :</u> Parlatıcı glaser; Glaze, ışıkla sertleşen koruyucu bir kaplamadır. Bu ürün, yapay dişler, çıkarılabilir protezler, geçici ve kalıcı kuron ve köprüler için estetik olarak parlak bir yüzey sunar. Cila makinesi ile ulaşılması zor olan protez alanlara uygulanarak cilalı ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur.	Kullanım Süresi:	Polimerize edilmemiş hali ile 2 yıl (raf ömrü), Polimerize edilmiş hali ile hasta ağzından çıkartılana kadar.
		Kullanım için talimatlar	
		PrintOn Cyclone ile en iyi özelliklere ulaşabilmek için lütfen aşağıdaki şekilde ilerleyin:	
		Baskı öncesi işlem önerileri:	
		- PrintOn şişeleri kullanmadan önce çalkalayınız. - PrintOn'ı 3D yazıcının tepsisine dikkatlice dökünüz. - Malzemedeki tüm kabarcıklar yok olana kadar malzemeyi tepside bekletiniz. 23°C ile 40°C işlem sıcaklığını koruyunuz. 3D yazıcının temiz olduğundan emin olunuz. - PrintOn reçine ile yeterince doldurulduğundan emin olunuz.	
		Baskı sonrası işlem önerileri:	
		- İşlem tamamlandıktan sonra üretilen nesneleri yazıcıda asılı bırakınız. - Nesnelerin uygun bir temizleme çözümü ile temizleyiniz. - PrintOn ile üretilen dental ürünler istenilen bir şekilde cilalanabilir ve onarılabilir. - PrintOn düşük viskozitesi sayesinde filtrelenebilir. Önerilen filtre çapı: <100 µm. - Tepsideki PrintOn reçineyi 12 saat içinde şişeye geri doldurunuz.	

Güvenlik Uyarısı

- PrintOn gözleri ve cildi tahriş edebilir.
- Polimerize olmamış malzeme ile cilt temasından kaçının.
- Nadir durumlarda, PrintOn reçinelerinin bileşenlerine alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.
- Tüm PrintOn ürünlerini ancak tamamen polimerize olduklarında işlemeye devam edin.
- PrintOn sınıf IIa ürünleri, teknik değerleri optimize etmek için 50 µm ile basılmalıdır.
- Yalnızca yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.
- Tıbbi cihazlar için hedef hasta grubu: yetişkinler ve adolesanlar.
- Verilen talimatlara uyulmadığı takdirde kalitenin bozuk veya yetersiz olmasına neden olur.
- Çalışırken koruyucu eldiven (nitril eldiven), koruyucu kıyafet ve koruyucu gözlük kullanın.
- Göz temasından kaçının! Sıvı malzeme ile kaza sonucu göz teması halinde, derhal bol su ile iyice yıkayın ve gerekirse bir doktora danışın.
- Doğrudan cilt temasından kaçının.
- Biyouyumluluk ancak doğru kullanıldığında garanti edilir (koruyucu atmosferde polimerizasyon)!

Depolama:

Kapalı kapları kuru ve ışıktan koruyarak saklayın! Hafif bir ışığa maruz kalma bile polimerizasyonu tetikleyebilir.

Not: PrintOn ile çalışırken, yalnızca gün ışığına / oda ışığına olabildiğince kısa bir süre maruz bırakın, çünkü ışığa çok uzun süre maruz kalmak malzemenin istem dışı sertleşmesine neden olur.

Şişeyi her zaman sıkıca kapalı tutun, her kullanımdan sonra dikkatlice kapatın.

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız!

Bertaraf etme:

Bertaraf etme Resmi düzenlemelere göre imha edin. Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kanalizasyona boşaltmayın.

Not:

OnDent Ltd. EN ISO 13485'e göre sertifikalıdır ve bir kalite güvence sistemi işletmektedir. Bu nedenle tüm On Dent ürünleri malzeme ve üretim hataları içermez ve her zaman mükemmel kalitededir. Kullanıcı ve dış laboratuvarımızdan tarafından önerilen değerlerin dikkatli bir şekilde belirlenmesi dayanmaktadır. Ürünün garanti kalitesini ve kullanılabilirliğini elde etmek için, ürün dosyalarında belirtilen tüm prosedür adımlarına sıkı bir şekilde uyulması gerekir. Kullanıcı, uygulamadan ve malzemenin kullanım amacından sorumludur. AB düzenlemelerine göre, tıbbi ürünler dış teknisyenleri tarafından özel yapım ürünler olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tıbbi cihazla bağlantılı olarak meydana gelen tüm ciddi olayları (ölüm, sağlıktaki ciddi bozulma, ciddi halk sağlığı tehlikesi) üreticiye ve üye devletteki yetkili makama bildirin. Garanti süresi içinde malzemede kusurlar meydana gelirse, kullanıcı yalnızca malzemeyi değiştirme hakkına sahiptir. On Dent Ltd., yasal dayanağı ne olursa olsun, doğrudan, dolaylı, özel eşlik eden veya sonuç olarak ortaya çıkan hasar olup olmadığına bakılmaksızın, bu malzemenin neden olduğu kayıp veya hasardan sorumlu değildir. On Dent Ltd., yasal temsilcilerinin veya icra çalışanlarının kasıtlı veya ağır ihmaline bağlı olarak malzemeye doğrudan maddi hasar ve ayrıca yasal hükümler uyarınca kişisel yaralanmalardan sorumludur. Kullanıcı belirtilen işlem adımlarına uymadıysa, malzeme ve kullanımından kaynaklanan dolaylı hasar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.



Onaylanmış Kuruluş

Lot Numarası

Ürün Kodu/Numarası

Üretici Adı ve Adresi

Kullanımdan sonra ambalajı ve ürünü çöpe atınız

Kullanım talimatlarına bakınız

Güneş ışığından uzak tutunuz

Son kullanma tarihi

Ref No: 4.2.3-2.F.9 Hazırlanma Tarihi: 29.06.2020 Rev Tr:11.12.2024 Rev No: 004

Ref No: 4.2.3-2.F.9 Hazırlanma Tarihi: 29.06.2020 Rev Tr:11.12.2024 Rev No: 004



TIBBİ MALZ. DİŞ PRO. İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Karacaoğlan Mh. 6166 Sk. No.32/1J 35070 Bornova - İZMİR - TÜRKİYE
Tel: +90 232 253 25 77 Fax: +90 232 264 03 67 www.on-dent.com e-mail: info@on-dent.com